
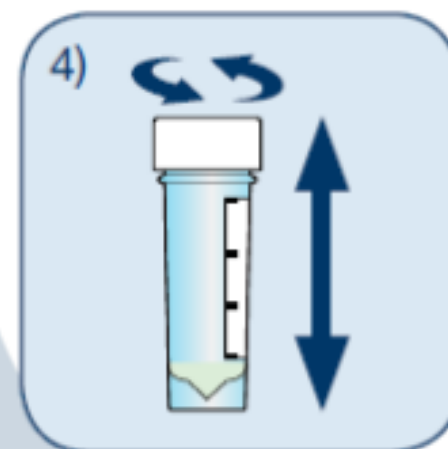


JAK POSTUPOVAT PŘI ODBĚRU VZORKŮ?

Vzorek odeberte ráno bezprostředně po probuzení, a to ještě před jídlem, pitím nebo čištěním zubů. Odběr provádějte ve vzpřímené poloze.

- 1) Odkášlejte si.
- 2) **Sliny z úst** (ne hlen) vyplivněte do odběrové zkumavky, ve které je již 0,5 ml reakčního roztoku.
- 3) Tento postup opakujte, dokud nebude v odběrové zkumavce zachycen 1 ml slin. Vzorek by měl sahat přesně po rysku zvýrazněnou na samolepce nalepené na zkumavce.
- 4) Odběrovou zkumavku zašroubujte a protřepejte, aby došlo ke smíchání vzorku slin s činidlem.
- 5) Do doby předání lékaři/odběrové sestře se vzorek musí uchovávat v chladu (2–8°C). Nemrazit!

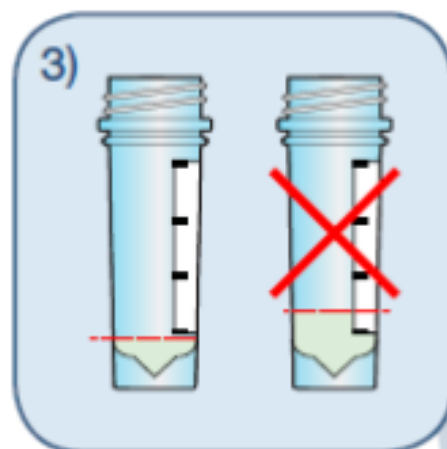

UPOZORNĚNÍ: Po dobu 48 hodin před odběrem vzorků se vyvarujte pití zásadité vody, antacid a léků s obsahem alginátů (např. Gaviscon). Půl hodiny před odběrem se vyhněte pití nápojů s obsahem kofeinu, sycených nápojů a kouření.